

AirProjet plus ЕЪР ПРОДЖЕТ ПЛЮС



Тези инструкции са важни, моля запазете ги за бъдещи справки.

Уважаеми потребители, Благодарим Ви, че избрахте ултразвуковият апарат за аерозолна терапия Еър Проджет Плюс на Pic Solution, който е проектиран и произведен в съответствие с най-новите технологии. Еър Проджет Плюс, резултат на най-новата разработка в ултразвуковата технология, трансформира медикамента в изключително фина пара, която се разпространява в белите дробове бързо и ефективно. Еър Проджет Плюс е надежден и лесен за употреба благодарение на готовия за употреба запечатан резервоар, който не изисква добавяне на вода през целия експлоатационен живот на устройството.



Преди употреба Ви препоръчваме да прочетете инструкциите за употреба, за да се уверите, че сте разбрали правилно как работи апаратът. За Ваше удобство, консултирайте се с Кратката листовка за потребителя, която е вътре в опаковката.

ПРИЛОЖЕНИ АКСЕСОАРИ

A - 2 в 1 AIRSOFT маска за деца и възрастни

B - мундшук

C - накрайник за нос

D - свързващ маркуч

A, B, C и D са налични като резервни части в сет за Projet REF 02038406100000

A и B са налични като резервни части в 2 в 1 AIRSOFT REF 02038040000000

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА УРЕДА

E - капаче на небулизиращата дюза

F - капак на резервоара

G - небулизираща дюза

H - регулатор на потока

I - резервоар за медикамент

L - разглобяем захранващ кабел

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Преди употреба прочетете внимателно информацията в това ръководство и го пазете за бъдеща справка. Ако имате някакви съмнения относно тълкуването на която и да е част от тази инструкция за употреба, моля свържете се с дилъра, дистрибутора или производителя.
- Апарат за аерозолна терапия. Следвайте инструкциите на Вашия лекар: какъв медикамент да използвате, дозировка, честота и продължителност на инхалациите.

Всички останали приложения на уреда, освен по предназначение са неправилни и следователно опасни. Компанията PIKDARE не носи отговорност за вреди, причинени от неправилна и неразумна употреба, също така ако апаратът е захранван в електрическа мрежа, която не отговаря на правилата

за безопасна употреба.

- Уредът може да спре да работи заради прекъсване на захранването, внезапна повреда или друго неблагоприятно обстоятелство, затова е препоръчително потребителите да имат алтернативно устройство или медикамент (с лекарско одобрение), които да бъдат използвани ако възникне подобно събитие.
- След като разопаковате уреда, проверете дали е непокътнат и дали няма някаква видима повреда, която би могла да се появи при транспортирането. Ако имате съмнение за причинена вреда, не използвайте апарата и веднага се свържете с обслужващия технически център на Pic.
- Развийте захранващия кабел докрай, преди да го свържете към електрическата мрежа.
- Ако захранващият кабел не е развит напълно, устройството може да прегрее.
- Никога не разглобявайте устройството. Всякаква техническа намеса трябва да бъде извършвана от технически персонал, оторизиран от PIKDARE. За информация, моля свържете се с обслужващия технически център на Pic.
- Опаковъчните материали (пликове, кутия и др.) може да бъдат опасни и трябва да се държат далеч от обсега на деца. Съхранявайте уреда извън обсега на деца, домашни животни и лица с намалена познавателна способност.
- Преди да свържете мрежовия адаптер към контакта, се уверете, че данните, показани на информационната табелка, и щепселът на адаптера са съвместими с тези на електрозахранващата мрежа и съответния контакт. Табелката с референтни данни е разположена върху мрежовия адаптер.
- При несъвместимост между предоставения щепсел на адаптера и контакта, който ще използвате, използвайте преходници, одобрени от съответното законодателство на държавата, в която се намирате или се свържете с оторизиран от PIKDARE техник, който да смени щепсела.
- За предотвратяване прегряване или повреда на устройството, трябва да го изключите след 10 минути непрекъсната употреба и да го оставите да се охлади за 30 минути.
- **ВНИМАНИЕ!** Използването на уреда преди да са изминали 30 минути може да доведе до прегряване на моторчето и да се задейства устройството за термична защита на уреда.
- Не използвайте уреда при наличието на азотен оксид, кислород или анестетична смес, възпламенима при контакт с въздух.
- Изключвайте уреда и адаптера от електрическата мрежа след употреба, преди премахване на остатъчен медикамент и добавяне на медикамент.
- Не препълвайте резервоара с медикамент. Следвайте индикациите за количество, показани в "ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ".
- Пазете устройството и захранващия кабел далеч от горещи повърхности
- Не използвайте уреда, когато сте във ваната или когато взимате душ, или когато се намирате във влажна среда или в близост до вани, мивки, умивалници, или във всяка друга обстановка, в която има течности, които биха могли да влязат в контакт с уреда.
- Никога не пипайте уреда или свързващия кабел с мокри или влажни ръце.
- Никога не изпускате, нито потапяйте уреда във вода или други течности.
- Ако това се случи, незабавно изключете уреда от захранването, спрете да го използвате и се свържете със Сервиза за техническо обслужване на PIKDARE.
- Не блокирайте отворите за охлаждане.
- Не използвайте уреда в случай на сънливост.
- Когато се използва от деца или от лица с намалени физически или когнитивни способности, е необходимо подходящо наблюдение от страна на възрастен. Децата трябва да се наблюдават от възрастен, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Уредът съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати, а кабелът на адаптера представлява опасност от удушаване.
- Не използвайте непредвидени от производителя разклонители или аксесоари.
- Уверете се, че по време на употреба уредът е поставен на равна и устойчива повърхност, за да предотвратите възможното му преобръщане.
- По време на употреба повърхността трябва да бъде свободна от всякакви предмети,

които биха попречили на правилното преминаване на въздушния поток.

- Никога не оставяйте устройството включено, ако не го употребявате или е без надзор.
- Преди извършване на каквито и да било дейности по почистване или поддръжка на уреда, изключете адаптера от електрическата мрежа, като извадите щепсела от контакта.
- Ако решите да не използвате повече уреда, изключете адаптера от електрическата мрежа и срежете захранващия кабел, така че уредът да не работи. Изхвърлете уреда и адаптера в съответствие с действащото законодателство и Директива 2012/19 ЕС. Препоръчваме Ви също така всички части на апарата, които са потенциално опасни, особено за деца, да се изхвърлят отделно.
- Направете справка с действащите закони за информацията относно изхвърлянето на износващите се принадлежности. За изхвърлянето на уреда, моля съобразявайте се с Директива 2012/19/ЕС.
- Не употребявайте уреда, ако при изпускане някоя от частите му е повредена или има следи от увреждане. Ако имате съмнения, свържете се с центъра за техническо обслужване на Pic.
- Ако апаратът спре да работи или не работи коректно, трябва да го изключите от електрическата мрежа и да се консултирате с центъра за техническо обслужване на Pic.

• **ВНИМАНИЕ! Не се опитвайте да разглобявате или да поправяте уреда.**

- Не включвайте устройството, ако резервоарът за медикамента е празен, защото това може да повреди устройството.
- Не вдигайте капака на резервоара и не влизайте в директен контакт с медикамента, докато устройството работи.
- Не оставяйте неизползван медикамент в резервоара. Стриктно спазвайте инструкциите в раздел "ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА РЕЗЕРВОАРА".
- Не използвайте устройството в стаи, където наскоро са били използвани спрейове; проветрете добре помещението, преди да пристъпите към терапия.
- Не поставяйте никакви предмети в охлаждащите отвори.
- Подвижният щепсел или конектор за захранващ кабел трябва винаги да е достъпен, по време на употреба, тъй като е необходимо да изключите уреда от електрическата мрежа.
- След като сте приключили с терапията, изключете устройството, изключете от електрическата мрежа, свалете аксесоарите, които сте използвали и почистете устройството и аксесоарите в съответствие с инструкциите в раздела за почистване и поддръжка.
- Пациент и оператор са едно и също лице. Операциите, които пациентът/ползвателят може да извършва безопасно, са операциите, посочени в раздели "Подготовка и употреба на уреда", "Почистване и поддръжка на резервоара за медикаменти", "Почистване и поддръжка на аксесоарите",.
- **ВНИМАНИЕ!** Не извършвайте сервисна дейност и/или поддръжка по време на използване на уреда! Всякакви други дейности (включително демонтаж и последващ повторен монтаж на изделието), операции по поддръжка, технически прегледи трябва да се извършват само и единствено от сервисния център на Pic.

КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ

Ексклузивният комплект аксесоари на Pic Solution REF02038406100000 съдържа единична изключително мека иновативна маска, която се адаптира към лицето и свежда до минимум загубата на медикамент. Създадена да осигури точна и ефективна терапия както за деца, така и за възрастни. Възрастните трябва да използват маската като покриват само устните, тъй като това е най-ефективният начин за достигане на разтвор директно в долните дихателни пътища, докато за децата маската трябва да се обърне обратно (на 180°), така че да покрива и носа и устата. Това трябва да е така, поради факта, че децата все още не могат да координират дишането си. Новата свързваща система между мундщука и маската осигурява директното навлизане на разтвора в устата за още по-ефективно действие. Употребата на мундщука без маската също е възможна.

ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА НА УРЕДА

- Извадете уреда и аксесоарите от опаковката.
- **ВНИМАНИЕ!** Внимателно проверете повърхността на резервоара за медикамент и всички компоненти преди употреба. В случай на счупване или повреда, не използвайте устройството и се свържете със сервисния център на Pic.
- Вдигнете капака на резервоара за медикамент (F).
- Поставете медикамент в резервоара (I), следвайки препоръките за дозиране на Вашия лекар или фармацевт.
- Съдържимото в резервоара никога не трябва да надвишава референтната маркировка на резервоара (фиг.4).
- Резервоарът за медикамент (I) има максимален капацитет от 8 мл; ако разтворът е в по-голям обем, разделете го за две инхалации.
- Резервоарът за медикамент (I) има минимален капацитет от 3 мл, ако разтворът не достига този минимум, то той трябва да бъде разреден с физиологичен разтвор, освен ако не е посочено друго в информационната листовка на медикамента.
- Затворете капака на резервоара и се уверете, че е плътно затворен.
- Изберете най-подходящия от аксесоарите: маска, мундшук, накрайник за нос. Ако не сте сигурни кой аксесоар да използвате, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Употреба на маска 2 в 1 за деца и възрастни:

- Свържете маската (A) към мундщука (B), след това свържете мундщука към гофрирания маркуч (D).

Употреба на накрайник за нос:

- Свържете накрайника за нос (C) към гофрирания маркуч (D);
 - Вдигнете капачето на небулизиращата дюза (E);
 - Свържете маркуча към небулизиращата дюза (G);
 - Свържете захранващия кабел към устройството;
 - Включете устройството в електрическата мрежа;
 - Включете устройството с натискане на бутона за включване (M), изберете силата на потока чрез увеличаване или намаляване на регулатора (H) и започнете терапията, за предпочитане в седнало положение и удобна поза;
 - Продължете инхалацията докато изходящата струя не се изчерпи. Ако не сте сигурни, че медикаментът е свършил, можете да преустановите терапията за кратко и после да продължите. След терапията ще остане малко количество течност (прибл. 0.5 мл) в небулизаторната камера;
 - Устройството има система за автоматично изключване 5 минути след стартирането. Ако е необходимо да продължите терапията, добавете медикамент в резервоара (I) отново, като махнете капака (F). След поставянето на капака обратно, стартирайте отново устройството с натискане на бутона за включване (M);
 - **ВНИМАНИЕ!** Никога не провеждайте повече от два 5-минутни последователни цикъла! След края на втория последователен цикъл изчакайте 30 минути, преди да използвате уреда отново! Ако не следвате тези предупреждения, може да се задейства устройството за термична защита на уреда;
 - След края на терапията, или когато е необходимо, натиснете бутона (M), извадете щепсела на кабела (L) от контакта и свалете аксесоара от маркуча; почистете устройството и аксесоарите, като следвате инструкциите в раздел "Почистване и поддръжка на резервоара за медикамент".
- Преди почистване на резервоара, изключете устройството от бутона (M) и от електрическата мрежа, извадете захранващия кабел (L) от устройството.
- ВНИМАНИЕ!** Не мокрете устройството и не го поставяйте във вода или други течности. За да почистите останал в резервоара медикамент, използвайте само мека, чиста кърпа, навлажнена с топла вода. Почистявайте повърхностите на резервоара (I) старателно особено в ъгълчетата. Устройството трябва да се почиства след всяка терапия. Не използвайте детергенти за почистване на устройството, тъй като те могат да го увредят.

ВНИМАНИЕ! Никога не почиствайте устройството с остри или груби предмети.

ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте запалими субстанции за почистване и поддръжка на резервоара и устройството. Внимателно подсушавайте резервоара за медикамент, преди да приберете устройството. Преди да приберете устройството, покривайте резервоара с капаче му и затваряйте небулизиращата дюза. Моля почиствайте и проверявайте състоянието на резервоара за медикамент преди и след употреба и не използвайте устройството, ако има повреда.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АКСЕСОАРИТЕ

Свалете всички използвани аксесоари (маска, мундшук, крайник за нос и маркуч) и ги измийте под течаща вода.

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте маската във вряща вода. Дезинфектирайте всички части, които влизат в контакт с пациент, като използвате денатуриран спирт. Почиствайте и проверявайте състоянието на аксесоарите преди и след употреба. Подменете ги, ако са повредени. Внимателно подсушавайте всички компоненти и устройството преди да го приберете. Съхранявайте на сухо и прохладно място, далеч от светлина и топлина.

Никога не използвайте бензол, разредител или други химични субстанции за почистване на уреда. За по-голяма хигиенна безопасност, препоръчваме Ви да избягвате употребата на едни и същи аксесоари от повече от един човек, а да закупите комплект аксесоари за всеки потребител (ЕърПроджет REF 02038406100000).

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте крайника за нос без надзор, тъй като това е малка част, която, погълната от деца, може да предизвика задушаване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинален волтаж: 100 - 240~

Номинална мощност: 46 VA

Честота на вибрация на датчика: 2.45 MHz ± 50 kHz

Условия за употреба на уреда: 10 минути включен - 30 минути изключен

Среден аеродинамичен диаметър на аерозолната частица (MMAD): 3.81 ± 0.18 µm

Максимален капацитет на резервоара за медикамент: 8 мл

Честота: 50/60 Hz

Предпазител: T 2A - L 250 V

Тегло: прикл. 0.75 кг

Вдишвани частици: 67.8 ± 2.9 %

Ниво на шум на разстояние 50 см* от уреда: около 39 dB

Минимален капацитет на резервоара за медикамент: 3 мл

Експлоатационен живот на уреда: 1000 цикъла/терапии

Експлоатационен живот на аксесоарите: 1 година

Полезен живот на съхранение: 1 година

*Данните за нивата на шума са измерени на нов апарат. Стойностите могат да варират при употреба.

Техническата информация, предоставена от производителя съгласно стандарта EN 13544-1 може да не е приложима при лекарства, които са в суспензионна или вискозно-вискозна форма.

EN 60601-1 Медицинска електрическа апаратура:

Част 1: основни изисквания за безопасност

EN 60601-1-2 Медицинска електрическа апаратура:

Част 1: основни изисквания за безопасност — допълнителен стандарт: електромагнитна съвместимост — изисквания и тестове

EN 13544-1 Уреди за дихателна терапия —

Част 1: небулизиращи системи и съответните им елементи.

Този раздел съдържа необходимата информация относно съответствието на продукта със стандарт EN60601-1-2. ЕърПроджет Плюс е медицински електроуред, който се нуждае от особени предпазни мерки относно електромагнитната съвместимост и който трябва да се инсталира и употребява в зависимост от предоставената информация за електромагнитна съвместимост.

Преносими и мобилни уреди за радиочестотна комуникация (мобилни телефони, радиоприемници и предаватели и др.) могат да повлияят на устройството.

ЕърПроджет Плюс REF 02038204100000 е предназначен за работа в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът или потребителят на ЕърПроджет Плюс REF 02038204100000 трябва да е сигурен, че го използва в такава среда.

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитни емисии.

Явление	Среда на съоръжение за професионални здравни грижи ^{a)}	СРЕДА НА ДОМАШНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ^{b)}
Провеждани и излъчвани РЧ ЕМИСИИ	^{a)}	CISPR 11 Група 1 Клас В
Хармонично изкривяване	IEC 61000-3-2 ^{a)} Клас А	
Флукутации и трептене на напрежението	IEC 61000-3-3 ^{b)} СЪВМЕСТИМ	

^{a)} Това оборудване е подходящо за използване в среда на домашни здравни грижи и в среди на професионални здравни грижи, които се ограничават до болнични стаи и съоръжения за респираторно лечение в болници или клиници. Отчетени са и са приложени най-строгите ограничения за приемане от Група 1 Клас В (CISPR 11). Оборудването е подходящо за употреба в горепосочените среди, когато е директно свързано към обществената електрическа мрежа.

^{b)} В тази среда не са приложими тестове, освен ако използваното МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ и СИСТЕМАТА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ не са свързани към ОБЩЕСТВЕНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА и входящото захранване не попада в обхвата на основния стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC).

Ръководство и декларация на производителя - Електромагнитна устойчивост - Порт на корпуса			
Явление	Основен стандарт за EMC или тестови метод	Тестови нива на устойчивост	
		Среда на съоръжение за професионални здравни грижи	Среда на домашни здравни грижи
Среда на домашни здравни грижи	Среда на домашни здравни грижи	± 8 kV при допир ± 2 kV, ± 4kV ±, ± 8 kV, ± 15 kV във въздуха	
Излъчени РЧ ЕМ полета	IEC 61000-4-3	^{a)}	10 V/m ^{b)} 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM при 1 kHz
Блиски полета от РЧ оборудване за безжични комуникации	IEC 61000-4-3	СЪВМЕСТИМ ЗАБЕЛЕЖКА: можете да поискате допълнителна информация за разстоянията, които следва да се поддържат между преносимо мобилно оборудване за РЧ комуникации (трансмитери) и ЕърПроджет Плюс REF02038204100000, като се свържете с PIKDARE S.r.l., като използвате информацията за контакт, предоставена в това ръководство. Препоръчително е обаче да държите електромеханичното аерозолно оборудване на подходящо разстояние (най-малко 1 метър) от мобилни телефони или други трансмитери на РЧ комуникации, за да сведете до минимум евентуалните смущения.	

НОМИНАЛНА честота на магнитните полета	промишлена IEC 61000-4-8	30 A/m ^{c)} 50 Hz или 60 Hz
--	--------------------------	---

^{a)} Това оборудване е подходящо за използване в реда на домашни здравни грижи и в среда на професионални здравни грижи, които се ограничават до болнични стаи и съоръжения за респираторно лечение в болници или клиници. Отчетени са и са приложени по-строги граници на възприемане на устойчивостта

^{b)} Преди да се приложи модулация.

^{c)} Това ниво на тест предполага минимално разстояние от поне 15 см между ЕърПроджет Плюс REF 02038204100000 и източниците на магнитни полета с промишлена честота.

Ръководство и декларация на производителя - Електромагнитна устойчивост - Порт за променливотоково захранване			
Явление	Основен стандарт за EMC или тестови метод	Тестови нива на устойчивост	
		Среда на съоръжение за професионални здравни грижи	Среда на домашни здравни грижи
Бързи електрически преходни процеси / Разряд	IEC 61000-4-4	± 2 kV 100 kHz честота на повтаряемост	
Междуфазови импулси	IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV	
Фазови импулси	IEC 61000-4-5	Оборудване от Клас II или предоставено с AC/DC адаптер от Клас II. Текстът не е приложим	
Кондуктивни смущения, индуцирани от РЧ полета	IEC 61000-4-6	3 V ^{a)} 0,15 MHz - 80 MHz 6 V ^{a)} в ISM честотни ленти между 0,15 MHz и 80 MHz ^{b)} 80 % AM при 1 kHz	
Кратковременни намалявания на напрежението	IEC 61000-4-11	0% UT, 0,5 цикъл При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315°С. 0% UT, 1 цикъл и 70 % UT, 25/30 цикъла Единична фаза при 0°С	
Прекъсване на напрежението ^{c)}	IEC 61000-4-11	0% UT, 250/300 цикъла.	

^{a)} Ефективна стойност, преди прилагане на модулация
^{b)} Честотните ленти от 0,15 MHz до 80 MHz, използвани от промишлени, научни и медицински радиочестотни устройства (ISM) са: 6,765 MHz - 6,795 MHz, 13,553 MHz - 13,567 MHz, 26,957 MHz - 27,283 MHz и 40,66 MHz - 40,70 MHz. Радио лентите, използвани за аматорски радио дейности от 0,15 MHz до 80 MHz са: 1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 MHz - 29,7 MHz и 50,0 MHz - 54,0 MHz
^{c)} Медицинското оборудване е с постоянно захранване, предназначено за използване с преобразувател на променливотоково към постоянно токово захранване, е тествано с преобразувател, който отговаря на спецификациите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на МЕДИЦИНСКОТО ОБОРУДВАНЕ. ТЕСТЪТ ЗА НИВОТО НА УСТОЙЧИВОСТ е приложен спрямо променливотоковото захранване на преобразувателя.

Можете да поискате допълнителна информация за разстоянията, които следва да се поддържат между преносимо мобилно оборудване за РЧ комуникации (трансмитери) и ЕърПроджет Плюс REF02038204100000, като се свържете с PIKDARE S.r.l., като използвате информацията за контакт, предоставена в това ръководство. Препоръчително е обаче да държите електромеханичното аерозолно оборудване на подходящо разстояние (най-малко 1 метър) от мобилни телефони или други трансмитери на РЧ комуникации, за да сведете до минимум евентуалните смущения.

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

	Внимание! Следвайте инструкциите за употреба		Включено - Изключено
	Двойна изолация.		Честота
	Уред, защитен срещу навлизането на твърди тела и течности. Уред, защитен срещу вертикално капене.		Сериен номер
	Уред с приложена част от тип BF		Идентификационен код на продукта
	В съответствие с директива MDD 93/42/EU +2007/47/EO		Производител
	Променлив ток		Партида

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА УРЕДА: Втората двойка цифри в партидният номер показва годината, а третата двойка - месеца LOT 1016100001, 16 = 2016, 10 = октомври).

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ		УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ УПОТРЕБА	
	Влажност 15% ч 85 %		Честота
	Символ Температури: -20°C ч 70°C		Сериен номер
	Атмосферно налягане от 700 hPa до 1060 hPa		Идентификационен код на продукта

ТОЗИ ПРОДУКТ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС
Символът, поставен върху уреда, изобразяващ зачертан контейнер, посочва, че апарата, след крайната му употреба, поради необходимостта да бъде третиран отделно от домакинските отпадъци, трябва да бъде предаден в специалните депа за разделно събиране на електрически и електронни апарати или върнато в магазина при закупуването на нова еквивалентна апаратура. Потребителят е отговорен за предаването на излезлия от употреба уред в определените депа за събиране. Правилното разделно събиране, целящо следващо пренасочване на уреда, оставен за рециклиране, третиране и съобразено екологично изхвърляне, допринася за предотвратяването на евентуални вредни въздействия върху здравето и околната среда и улеснява рециклирането на материалите, от които е съставен уреда. За по-подробна информация относно депата за събиране се обърнете към местните компетентни органи или към магазина, от който сте закупили продукта.

ГАРАНЦИЯ

Уредът има гаранция от 2 години в случай на производствен дефект при нормални условия на използване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Гаранцията не е валидна в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства. За продължителност на гаранцията при липси на съответствие вижте съответните разпоредби на националното законодателство.



Numero verde consumatori Italia
800 188 898

www.picsolution.com

REF00 035800 000 000

Artsana S.p.A
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italia

Made in Italy - Fabricado em Itália - Fabricado en Italia - Κατασκευάζεται στην Ιταλία

Медицинско представителство за България:

„Булгермед ВЕ“ ООД, гр. София, ул. „Светослав Тертер“ № 24, тел.: 02/942 70 70,
e-mail: office@bulgermed.com; www.bulgermed.com