


Инструкции за употреба на новия микроизиран назален душ

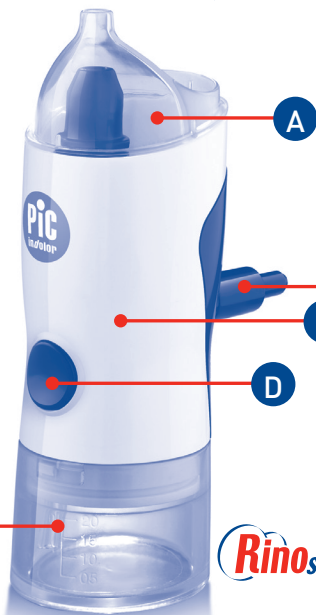

Rinoshower

Въведение

Rino Shower е микроизирано устройство за назални промивки, перфектно за почистване на носните пътища и ринофаринкса. Дизайнът му е специално разработен така, че да направи терапията по-практична и ефективна, като сведе до минимум количеството неусвоено лекарство. В допълнение, благодарение на практичния двоен конусовиден накрайник, устройството може да се използва както от деца, така и от възрастни. Едно просто завъртане е достатъчно и получавате два конуса с различен размер. Едно единствено устройство за цялото семейство.

Компоненти

- A** – двоен конусовиден накрайник (конусче) / деца/възрастни/
- B** – ергономичен корпус на душа
- C** – контейнер
- D** – бутон за дозиране
- E** – резервоар (20 ml)
- F** – свързващ маркуч

Общи предупреждения

Да се използва с пневматичен апарат (с компресор). Моля запознайте се с инструкциите за употреба на устройството, за да го използвате правилно.





- Когато устройството се използва от деца или

от лица с намалена физическа или познавателна способност, е необходимо да се осигури постоянен надзор.

- Устройството не трябва да бъде използвано, в случай че някоя част е повредена, както и след падане/изпускане на устройството.

Подготовка и употреба на устройството

- Отворете прозрачния резервоар като го завъртите леко обратно на часовниковата стрелка докато не се размести от безопасната позиция. Отстранете резервоара (фиг. 1);
- Напълнете резервоара с не повече от 20 ml физиологичен разтвор на PiC или друго, следвайки предписанията на Вашия лекар (фиг. 2);
- За да преминете от варианта за възрастни към педиатричния (или обратно), свалете конусчето, завъртете го на 180° и го поставете в корпуса на душа (фиг. 3);
- Затворете прозрачния резервоар отново, като поставите вложката на корпуса в каналчето на резервоара и го завъртете в посока на часовниковата стрелка, докато усетите, че е щракнало на мястото си;
- Свържете единия край на свързващия маркуч към изхода за сгъстен въздух на компресорния апарат, а другият към улейчето на назалния душ (фиг. 4);

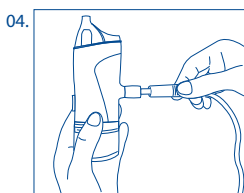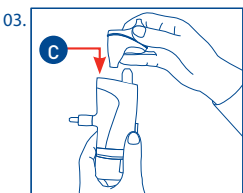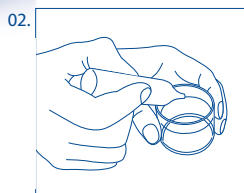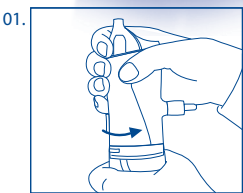

- Включете апарата към електрическата мрежа;
- Уверете се, че всички части са правилно поставени и свързани една с друга;
- Включете апарата чрез натискане на бутона за включване/изключване (моля прочетете инструкциите на апарата);
- Поставете иригатора близо до ноздрата. Дръжте бутона за дозиране натиснат през цялото време и проведете терапията както обикновено. Препоръчва се по време на терапията, ноздрата на която не се прилага назален душ, да се запуши с пръст.
- Ако отпуснете бутона, протичането на душа прекъсва. За да го възстановите, натиснете бутона отново и го задръжте натиснат за непрекъснато протичане.

Количеството физиологичен разтвор на РiС, използвано в резервоара, трябва да бъде разпределено по равно между двете ноздри. По време на терапията трябва да дишате нормално. Прекъснете небулизацията, за да издохате носа си, когато е необходимо. В края на терапията в контейнера ще има събрано определено количество физиологичен разтвор и секрет; това е нормално и по никакъв начин не повлиява резултата от терапията. След приключване на терапията, изключете устройството и го почистете/дезинфекцирайте по описания по-долу начин.

Почистване и дезинфекция

Микронизираният назален душ трябва да се изпразва и почиства след всяка употреба, за да се предотврати образуването на наслоявания, които могат да компрометират правилното му действие.



Разглобете отделните части на душа. Изплакнете внимателно с хладка вода, както отвътре така и отвън, корпуса, конусчето и контейнера. Ако е необходимо дезинфекцирайте частите с денатуриран спирт и изплакнете старателно. Оставете частите да изсъхнат. Изхвърлете продукта в съответствие с действащите разпоредби.

Техническа информация

Текущ поток	17	lpm
Поток на душа	10	lpm
Налягане на струята	0,7	bar

Текущ поток	13	lpm
Поток на душа	8	lpm
Налягане на струята	0,3	bar

Символи

 Внимание! Прочетете приложените документи.
 В съответствие с директива MDD 93/42/0470 CEE + 2007/47/CE

Гаранция

Rino shower е с гаранция 2 години, което покрива неизправност на използваните материали или производствени дефекти. Повредените части ще бъдат подменени безплатно в случай, че устройството не е ремонтирано самостоятелно от клиента и в случай, че са спазвани всички инструкции за употреба. Всеки опит за ремонтане на устройството от неупълномощени от Artsana S.p.A. служители незабавно анулира гаранцията. В случай на неизправност или на неправилна употреба, моля свържете се с упълномощения сервиз за техническо обслужване на РiС.

Медицинско представителство за България:

„Булгермед Ве“ ООД, гр. София,
ул. „Светослав Тертер“ 24, тел.: 02/942 70 70,
e-mail: office@bulgermed.com;
www.bulgermed.com