

Инструкция за употреба на медицинско изделие

Прочетете внимателно цялата инструкция, преди да започнете да използвате това медицинско изделие, тъй като тя съдържа важна информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако симптомите продължават или се влошават, обърнете се към лекар.

СуперОптик Къмплийт

Капки за очи с натриев хиалуронат 0,2% и декспантенол 2%

Не съдържа консерванти.

Съдържание:

1. Какво представлява медицинското изделие СуперОптик Къмплийт и за какво се използва
2. Важна информация преди използването на медицинското изделие СуперОптик Къмплийт
3. Как да използвате медицинското изделие СуперОптик Къмплийт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате медицинското изделие СуперОптик Къмплийт
6. Друга информация

1. Какво представлява медицинското изделие СуперОптик Къмплийт и за какво се използва

СуперОптик Къмплийт са стерилни капки за очи, съдържащи натриев хиалуронат и декспантенол, без консерванти.

Натриевият хиалуронат е натриева сол на хиалуроновата киселина, която е естествен полизахарид, съществуващ в човешкия организъм. Декспантенол е вещество от групата на витамин В, което подпомага свойствата на натриевия хиалуронат. Тези съставки овлажняват, обновяват, подпомагат регенерирането, предпазват и подхранват повърхността на окото. СуперОптик Къмплийт облекчава раздразнените, сухи и уморени очи, като възстановява естествения баланс на хидратиране на очите и спомага за поддържането им в добро състояние. СуперОптик Къмплийт съдържа натриев хиалуронат – естествено вещество, което създава равномерен, устойчив и дълготраен защитен филм върху повърхността на окото. Този филм няма нежелани ефекти върху зрението.

СуперОптик Къмплийт съдържа също така декспантенол (провитамин В₅), който засилва овлажняващите свойства на натриевия хиалуронат, подпомага регенерирането и предпазва повърхността на окото.

СуперОптик Къмплийт овлажнява, предпазва и образува защитен филм върху повърхността на окото, премахвайки дискомфорта, свързан с:

- механично раздразнение на окото, напр. при офталмологични прегледи и при използване на контактни лещи;
- влияние на факторите на околната среда – климатици, студ, топлина, сух въздух, вятър, замърсяване на въздуха, причинено от цигарен дим, както и пребиваване на запрашени места или на слънце;
- прекомерна умора, напр. поради работа с компютър, микроскоп, часове на шофиране.

СуперОптик Къмплийт може да се използва от хора които носят всякакъв вид контактни лещи.

2. Важна информация преди използването на медицинското изделие СуперОптик Къмплийт

Не използвайте медицинското изделие СуперОптик Къмплийт:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя от съставките на продукта;
- ако имате инфекция на окото(очите).

Предупреждения и предпазни мерки

Не са известни взаимодействия (влияние) с други капки за очи. Ако е необходима съпътстваща употреба на други капки или маз за очи, трябва да има интервал от 15 минути между тяхното приложение. СуперОптик Къмплийт трябва да се използва последен.

След поставянето на капките може да получите временно краткотрайно замъгляване на зрението. Не трябва да шофирате и да работите с машини, докато нарушенията не изчезнат.

3. Как да използвате медицинското изделие СуперОптик Къмплийт

Следвайте инструкциите по-долу за улесняване на правилното приложение на медицинското изделие СуперОптик Къмплийт.

Начин на употреба

От хигиенни съображения една опаковка от продукта трябва да се използва само от един потребител.

Внимателно измийте ръцете си преди да поставите капките с медицинското изделие СуперОптик Къмплийт.

Преди първата употреба, отстранете капачката, обърнете бутилката с дозатора надолу, след което внимателно стиснете стените на бутилката, докато се появи първата капка.

Сваляйте капачката преди всяка употреба и поставяйте капките в окото(очите).

Обичайната доза е 1-2 капки 3 пъти дневно в конюнктивалния сак на всяко око или както Ви е препоръчал офталмологът.

Бавно затворете очите, за да може течността да покрие равномерно цялата повърхност на окото(очите).

Затворете бутилката.

Избягвайте да докосвате повърхността на окото с върха на капкомера.

Тъй като СуперОптик Къмплийт не съдържа консерванти, като цяло се понася добре и може да се използва продължително време.

В случай че въпреки употребата на продукта раздразнението продължава и не отминава дълго време, трябва да се консултирате с офталмолог.

Ако сте използвали повече от препоръчаната доза от изделието СуперОптик Къмплийт

Няма случаи на предозиране.

4. Възможни нежелани реакции


В изолирани случаи може да се получат алергични реакции като парене, сълзене на очите, които отминават след прекратяване на употребата на продукта. Непосредствено след поставянето на капките може да получите временно краткотрайно замъгляване на зрението. Ако получите симптоми на алергична реакция или други нежелани реакции, уведомете производителя.

5. Как да съхранявате СуперОптик Къмплийт

Да се съхранява при температура под 25°C.

Съхранявайте бутилката плътно затворена във външната кутия.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте медицинското изделие СуперОптик Къмплийт след датата на изтичане на срока на годност () , посочена на бутилката и картонената кутия.

Продуктът може да се използва в срок от 90 дни след първото отваряне.

6. Друга информация

Състав

СуперОптик Къмплийт съдържа: натриев хиалуронат 0,2%, декспантенол 2%, натриев цитрат дихидрат, монохидрат на лимонената киселина, високопречистена вода.

Прозрачни, бистри капки за очи.

Опаковка: бутилка, съдържаща 5 ml или 10 ml разтвор, снабдена със затварящ клапан и филтър, който предпазва продукта от замърсяване с микроорганизми, поставена в картонена кутия.



Polfa Warszawa S.A.
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa, Poland
tel. +48 22 691 39 00
www.polfawar.com.pl

Дата на изготвяне на инструкцията: м. септември 2015 г.

CE 0197



Значение на използваните символи:



Стерилно



Прочетете инструкциите за употреба.




Годно до: (дата на изтичане на срока на годност)



Производител



Партиден номер

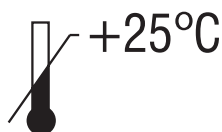

Да се съхранява при температура под 25°C