


Овлажняващи
капки за очи

**Кристал
Вижън**

Lubricant
Eye Drops

**Crystal
Vision**

 Тази инструкция за употреба съдържа важна информация относно употребата и безопасността на този продукт. Моля, прочетете внимателно и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да причини сериозни проблеми с очите.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Кристал Вижън капки за очи е успокояващ и овлажняващ разтвор за очно приложение, който се прилага при усещане за сухота, умора или дискомфорт в очите, причинени от гразнителни от околната среда или очна хирургична намеса.

Кристал Вижън капки за очи могат да се използват едновременно с всички видове контактни лещи.

ОПИСАНИЕ

Кристал Вижън капки за очи е стерилна, безцветна до бледо жълта течност, леко хипотоничен воден разтвор, който съдържа 0,3 % Хипромелоза (Hydroxymellose).

Кристал Вижън капки за очи съдържа консервираща система – натриев перборат и диетилентриамин пентаметилен фосфониева киселина, която отделя в ниски концентрации водороден пероксид като ефективен антибактериален агент. При контакт с очната повърхност водородният пероксид се разгражда до вода и кислород в рамките на една минута.

STERILE A Произведен чрез асептична техника.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Кристал Вижън капки за очи може да се използва толкова често, колкото е необходимо през целия ден.

Измийте ръцете си преди употреба.

Наклонете главата си назад и гръбнете долния клепач надолу. В така оформеният „джоб“ на конюнктивата поставете една или две капки от разтвора във всяко око и премигнете няколко пъти.

Избягвайте допир на върха на апликатор-капкомера с окото или околните повърхности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


(КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА)

Не използвайте продукта ако сте алергични към някоя от съставките.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

• Преди употреба проверете дали защитния пръстен на капачката е машинно запечатан. Ако е счупен или повреден – не използвайте продукта.

• Унищожете всяко остатъчно количество от капките за очи 28 (двадесет и осем) дни след първоначалното отваряне на флакона.

 • Не използвайте продукта след изтичане срока на годност.

• Ако е необходимо в окото да се поставят повече от едно лекарство, трябва да се осигури интервал от поне 5 минути между тях, като Кристал Вижън се поставя последно.

• Затворете флакона след употреба.



- Да се съхранява в оригиналната опаковка.
- Не допирайте върха на апликатор-капкомера до очите или до околните повърхности, тъй като това може да причини микробно замърсяване на продукта.
- Всеки флакон трябва да се използва само от един човек, за да се избегне микробно замърсяване.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ако се появят симптоми на гразнене или дискомфорт в очите, преустановете употребата на продукта и се консултирайте с Вашия очен лекар.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Може да се появи преходно замъглене на зрението непосредствено след накапването на очните капки.

Има редки съобщения за парене или щипене, алергична реакция и зачервени очи след накапване в окото. Ако някой от изброените симптоми се появи при Вас, преустановете употребата на продукта и се консултирайте с Вашия очен лекар.

ВИД НА ОПАКОВКАТА

Бял пластмасов флакон с апликатор-капкомер от 10 ml, затворен с капачка на винт със защитен пръстен.

1 (един) флакон Кристал Вижън капки за очи, заедно с инструкция за употреба в картонена кутия.

Изхвърлете с нормалните отпадъци на означените места, съгласно местното законодателство.

СРОК НА ГОДНОСТ

2 (две) години при температура под 25°C.

28 (двадесет и осем) дни след първото отваряне на флакона (съхранение в оригиналната опаковка при температура под 25°C).

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Натриев хлорид, калиев хлорид, борна киселина, натриев перборат хидрат, хлороводородна киселина разрежена, диетилентриамин пентаметилен фосфониева киселина, вода за инжекции.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Април, 2011



Балканфарма-Разград АД

Бул. "Априлско въстание" 68
7200 Разград
България

 0120